

## PROTOCOLE DE GESTION DU MATÉRIEL D'ASPIRATION


### L'aspiration douce (gastrique)

#### 1) Définition :

Système qui permet d'aspirer, à faible dépression le contenu gastrique. À ne pas confondre avec une aspiration montée sur un Pleurevac

#### 2) Matériel :

- Un manomètre 250 mbar
- Un barboteur
- Une poche d'aspiration
- Un réceptacle
- Un support mural
- Deux tubulures : l'une avec un renflement, l'autre avec trois renflements
- Un embout biconique

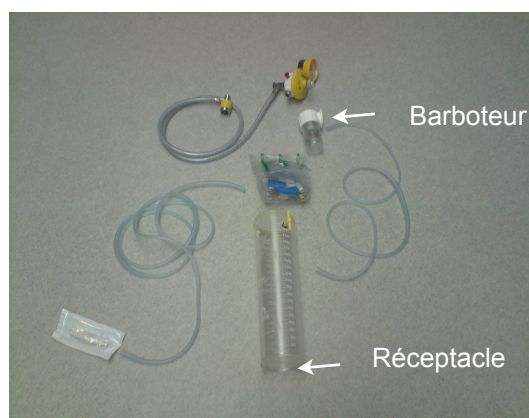

### L'aspiration forte

#### 1) Définition :

Système qui permet d'aspirer, à forte dépression, les sécrétions buccales, nasopharyngées et trachéales.

#### 2) Matériel :

- Un manomètre 1000 mbar
- Un barboteur
- Une poche d'aspiration
- Un support mural
- Une tubulure avec un renflement
- Un système stop-vide (kit d'aspiration Clean Vac™)
- Une bouteille d'eau stérile de 1 litre
- Un réceptacle



### Techniques

#### 1) Fréquence de changement :

- Ré-équipement de la chambre après le départ d'un patient lorsque le système d'aspiration a été utilisé
- Le changement s'effectue 3 fois par semaine (AS de jour) les **lundi, mercredi, vendredi** ou si le réceptacle est plein
- La poche doit être signé du nom de l'agent qui a effectué le changement, avec la date

## 2) Comment installer un système d'aspiration ?

- Prendre la tubulure à 1 renflement
- En brancher une des extrémités à l'aspiration murale, l'autre à l'embout jaune le long du réceptacle.
- Prendre une nouvelle poche d'aspiration, la dérouler, la glisser dans le bocal, l'emboîter et la raccorder à l'autre partie de l'embout jaune du bocal.

Aspiration douce	Aspiration forte
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccorder la tubulure à 3 renflements sur le couvercle bleu de la poche d'aspiration</li> <li>- Mettre en place un raccord biconique à l'autre extrémité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccorder la tubulure d'un système stop-vide sur le couvercle bleu de la poche d'aspiration</li> </ul>

## 3) Comment renouveler une poche d'aspiration ?

- Mettre des gants non stériles
- Stopper l'arrivée du vide, au niveau du manomètre (appuyer sur le bouton rouge).
- Retirer et jeter le stop-vide (pour l'aspiration forte) et le tuyau relié au raccord biconique (pour l'aspiration douce)
- Raccorder la tubulure (à embout jaune) à la poche au socle bleu et jeter le tout
- Prendre une nouvelle poche, l'étirer pour la déplier complètement
- La mettre en place dans le pot à réceptacle.
- Relier l'embout jaune de la tubulure au pot d'aspiration (« jaune sur jaune »).
- **Si aspiration forte** : connecter le stop-vide au socle bleu.
- **Si aspiration douce** : connecter le tuyau au socle bleu.
- Enclencher le vide en appuyant sur le bouton vert.
- Vérifier la fonctionnalité et le montage du système d'aspiration.

## 4) Remarques :

- **Après la sortie d'un patient**, il faut tout changer c'est-à-dire barboteur, tubulures (même celle reliant la poche au barboteur), poches, raccord biconique et réceptacle.
- Renouveler la poche d'aspiration lorsque cette dernière est au  $\frac{3}{4}$  pleine

## Groupe de travail :

**IDE** : Aurélie Le Gousse, Clémence Guérin, Carole Palene, Solange Payet

**AS** : Christiane Daverat, Majda Oudaoud, Andréa Mbongo

**Médecin** : PE Leblanc

**Cadre** : Véronique Allain

